


HEM COL

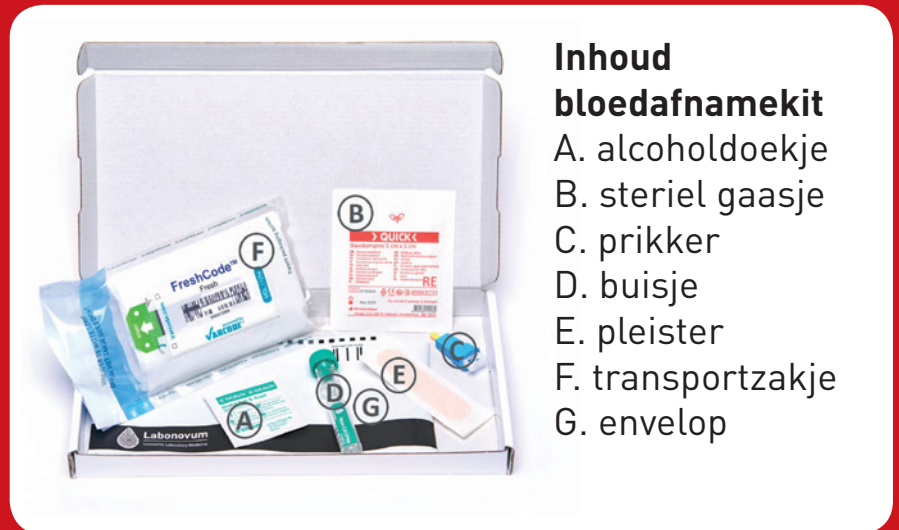

Labonovum

Innovative Laboratory Medicine

www.labonovum.nl / info@labonovum.com

Gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing leest u hoe u met Hem-Col® eenvoudig bloed kunt afnemen.

HEM COL



1. **Leg het volgende klaar**

- Hem-Col buis
- (dop eraf)
- alcoholdoekje
- steriel gaasje
- pleister
- prikker



8. Vang 6 druppels bloed op tot de inkeping op de buis.



9. Meng opnieuw het bloed goed met de vloeistof door tegen de buis te tikken.



2.



Alleen de zijkant van het topje van de ring- en middelvinger mogen gebruikt worden voor de prik. Was de handen met warmwater en zeep

3.



Bevorder de bloedstroom door de ring- en middelvinger van handpalm naar vingertop te masseren.

10.



Plaats de buis in het transportzakje.

11.



Verwijder de witte strip en plak het zakje dicht.

4.



Ontsmet de ring- en middelvinger met het alcoholdoekje. Laat de alcohol goed verdampen of veeg de vinger droog met het steriele gaasje.

5.



Trek het gele puntje van de prikker.

12.



Activeer de temperatuurmeting door het groene label uit de streepjescode te trekken.

13.



Plaats het transportzakje in de envelop.

6.



Leg de hand op een harde ondergrond. Prik jezelf of laat je prikken door de prikker stevig haaks op de vinger te plaatsen en de witte knop indrukken.

7.



Stuw voorzichtig en schraap de bloeddruppel op met de schraper op het buisje. Na elke druppel het buisje tegen een harde ondergrond tikken om het bloed goed te mengen met de vloeistof in de buis.

14.



Verwijder de witte strip en plak de envelop dicht. Geef de envelop af bij een PostNL punt.