



Gebruiksaanwijzing


In deze gebruiksaanwijzing leest u hoe u met DNA-Col® eenvoudig DNA kunt verzamelen uit wangslimvlies.




Labonovum

Innovative Laboratory Medicine


www.labonovum.nl / info@labonovum.com

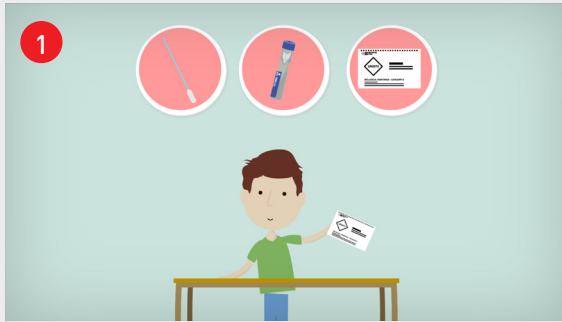


In de DNA-Col kit vind je de volgende benodigdheden: een steriele wattenstaaf, de DNA-Col buis en het verzendpakketje.

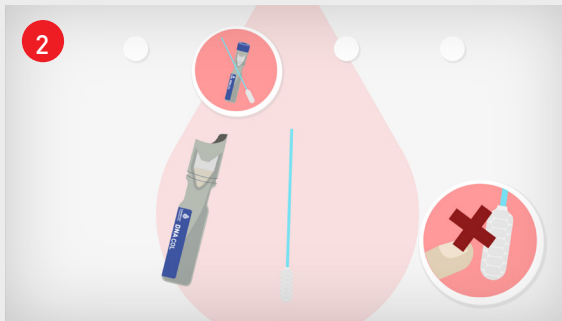


Open de DNA-Col buis door de blauwe dop te verwijderen. Open de folie van de wattenstaaf aan de zijde waar de steel zich bevindt. Raak het witte gedeelte niet met de vingers aan.

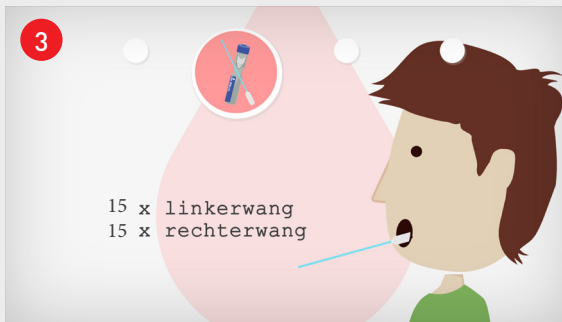


Stop de wattenstaaf in de mond en strijk met dezelfde kracht als met tandenpoetsen 15x langs de binnenzijde van de linkerwang en 15x langs de binnenzijde van de rechterwang. Strijk van boven naar beneden.

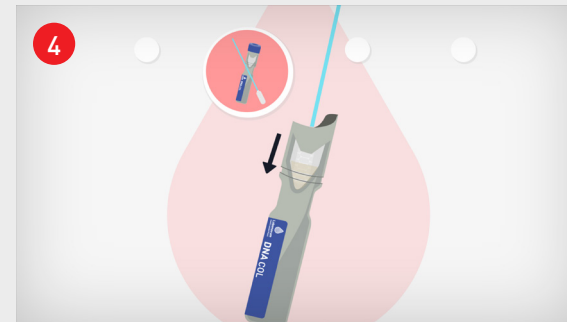

Stop de wattenstaaf in de bijgeleverde DNA-Col buis. Duw het witte gedeelte goed door de opening van de buis en trek het staafje terug. Het witte gedeelte valt in de vloeistof in de buis. Sluit de buis af met de dop en gooi het staafje weg.

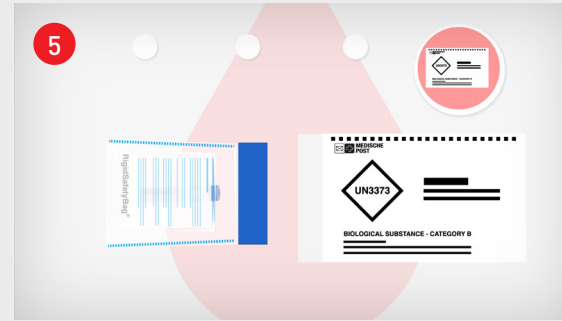

Stop het DNA-Col buisje in het afsluitbare zakje, verwijder de witte strip aan de bovenzijde en plak het zakje dicht. Stop het zakje in de verzendenvolp en sluit ook deze goed af nadat ook hier de witte strip is verwijderd.

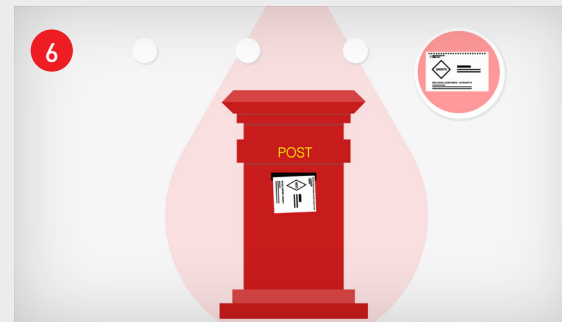

De envelop kan gewoon in de brievenbus. Is de temperatuur buiten rond het vriespunt of hoger dan 25°C geef de envelop dan af bij een PostNL punt.